

介護リフト用の吊り具(スリングシート)は



消耗品

重大事故の原因にも…

劣化したり、古くなった吊り具は**危険**です。

日常の点検と適切なお手入れを行って下さい。

また吊り具には、耐久年数があります。各メーカーでご確認下さい。

漂白剤を使用



色落ちした繊維と劣化し裂けたストラップ

乾燥機を使用



乾燥機を使用したため繊維やクッション材が縮んでいる

経年劣化(布が裂ける、縫製部分のほつれ)



吊り具の一部が裂けている



縫製のほつれがみられる

⚠️ 漂白剤の使用は厳禁

吊り具を安全にご使用していただくために

日常の点検	布が裂けていたり、縫製部分の糸のほつれがないか、使う前に必ず点検してください。
洗濯の方法	漂白剤の使用は、生地やミシン糸を著しく劣化させます。洗濯方法は各メーカーの表示を参照してください。
保管の方法	直射日光を避けて保管してください。紫外線は生地やミシン糸を劣化させる原因となります。



リフト関連企業連絡会

Tel.03-3437-2623 Fax.03-3437-2624

ホームページアドレス… http://www.jaspa.gr.jp/lift_consortium/index.html

リフト関連企業連絡会

検索

リフト関連企業連絡会はリフトの利用技術を高めるためにリフトインストラクターの講習会や、スリングシートを安全に使用して頂くための啓発活動を行っています。

- ①リフトフェア等の行事を通じて幅広くリフトの普及と必要性を訴える活動
- ②テクノエイド協会、各都道府県の介護実習普及センターに協力し、リフトの普及、研修の活動
- ③リフトインストラクターの認定試験を実施し、資格証を発行することで、リフトに対するプロを育成する事業
- ④ホームページなどを通じて利用者や施設でのリフトの導入の技術的援助の実施
- ⑤リフト及び吊り具について、日本国内での技術向上のための活動

会員企業

アビリティーズ・ケアネット(株) / (株)ウェル・ネット研究所 / (有)オオタ商会 / 新光産業(株) / 竹虎ヒューマンケア(株) / パシフィックサプライ(株) / パラマウントベッド(株) / (株)ビック・バン / (株)ミクニ / 明電興産(株) / (株)モリト