

## バッテリー残量がゼロになった場合の緊急降下方法

リフトの右側(折りたたみスリングサポートの近く)に緊急下降装置があります。  
こちらに同梱の特殊工具を挿入して降下させてください

- ①本体の下にある赤色の緊急停止ボタンを押し込みます。  
利用者様を降ろすことのできる安全な場所、例えばベッド上などに移動させます。
- ②緊急下降装置をカバーしている黒色のプラスチックキャップを外します。
- ③前述の特殊工具を挿入します。工具を時計回りに回すと利用者様を降下させることができます。利用者様が安全な場所に降りきるまで工具を回します。

