

バッテリー残量がゼロになった場合の緊急降下法

図9



緊急降下

緊急降下は、主制御がうまくいかなかった時に、持ち上げアームを下降させます。

ハンドコントロールまたはコントロールパネルの故障時には、アクチュエータ上の赤いハンドルを見つけてます。

赤いハンドルを徐々に引き上げ、アームが希望するレベルに下がるまで引き続けます。赤いハンドルと患者様の体重を引っ張るって加えられる力は、下降する速度に影響します。(図9を参照)

警告

怪我を防止するため、緊急降下機能を作動させる前に、適切なサポート用具が患者の下に配置され、患者様を受け入れる準備ができていないことを必ず確認してください。

ハンドルはばねの負荷にて、元の位置に戻ります。赤いハンドルを離すと、下降が止まります。

注記

緊急降下機能の使用の際は、アームに荷重を加える必要があることにご注意ください。

※赤いハンドルを引き上げても下降しない場合には、介助者がアームに荷重を加えて下降させてください。